

玻璃体温计说明书

【医疗器械生产许可证编号】苏食药监械生产许20040105号

【医疗器械注册证编号】苏械注准20192070603

【产品技术要求编号】苏械注准20192070603

【产品名称】玻璃体温计

【规格型号】体温计分为三角型棒式、内标式两种型号，三角型棒式分为口腔、肛门两种规格、内标式分为大、中、小三种规格。

【产品性能、主要结构组成】玻璃体温计由玻璃制造，可外置玻套，具有测温留点结构，感温液为镓基合金。体温计分为三角型棒式、内标式两种型号，三角型棒式分为口腔、肛门两种规格、内标式分为大、中、小三种规格。

【适用范围】用于临床或个人测量体温用。

【使用方法】

1、玻璃体温计使用前应用75%的医用酒精浸1-3分钟消毒。

2、用手指捏住消毒处理过的玻璃体温计的上端，将其玻璃管内感温液甩到35℃以下。将感温泡的部位放入测试者的腋下或舌下或肛门，夹紧后，3-5分钟取出读数。

3、读数时将体温计的感温泡下斜，内芯管对准视线将体温计稍向前后转动读数。

4、口腔部位测定的感温液顶端所对应的温度刻线为实际体温，腋下部位测定读数应加上0.5℃为实际体温，肛门部位读数应减去0.3℃为实际体温。

【注意事项、警示及提示说明】

1、注意玻璃体温计消毒时不可超过42℃；

2、由于感温泡玻璃较薄，贮运使用过程中应注意避免剧烈震动碰撞；

3、在测体温前，凡影响实际体温的因素（如刚刚进行剧烈运动、饮开水或冷饮等）均应避免。

4、肛门体温计经消毒后涂以润滑油脂，然后插入肛门，测量时用水捏住防止滑出跌落。

【禁忌症】无

【维护和保养】

1、本产品采用环保材料印刷刻度字示数，为保证质量和清晰，不能在酒精桶内长期浸泡，更不能用锋利刀片在刻度线上刻，会造成损坏和不清晰，需更换。

2、本品在日常维护中应注意和硬质物品碰撞；

3、在每次使用开始前和结束后均要使用75%的医用酒精浸1-3分钟消毒。

【储存条件】包装后的体温计应贮存在环境温度不超过42℃、空气干燥、相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

【图形、符号、缩写等内容的解释】



批次代码 查阅使用说明

【注册人/生产企业】扬州华祥医疗器械有限公司

【售后服务单位】扬州华祥医疗器械有限公司

【注册人住所】扬州市广陵区李典镇新坝村前三组

【生产企业住所】扬州市广陵区李典镇新坝村前三组

【生产地址】扬州市广陵区李典镇

【电话】0514-87416848【传真】0514-87416858

【生产日期】见包装盒内或标签

【使用期限】长期。在遵守贮存和使用规定的条件下，从出厂日期（按产品生产年代号）起，在两年内不能正常使用时，我公司无义务给予修理或更换；定期校验，失准报废。

【说明书编制日期】2018年5月28日